



НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ **MOVING LIFE**


Весы напольные умные
Bodyscan Guru



Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения MovingLife может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Загрузите и установите приложение MovingLife, отсканировав QR-код. Либо для загрузки на Android скачайте приложение MovingLife из Google Play, а для загрузки на iOS – из App Store.
2. Откройте приложение и войдите в систему, если у Вас есть учетная запись MovingLife. Для этого введите электронную почту и пароль, согласитесь с политикой конфиденциальности и нажмите на кнопку «Вход».

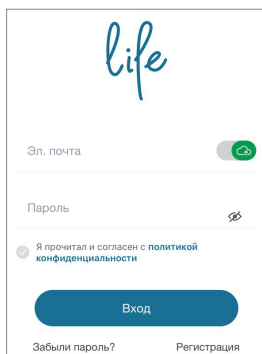


The screenshot shows the login interface of the MovingLife app. At the top is the 'life' logo. Below it are two input fields: 'Эл. почта' (Email) and 'Пароль' (Password). To the right of the email field is a green toggle switch. Below the password field is a small icon of a crossed-out eye. Underneath these fields is a checkbox with the text 'Я прочитал и согласен с политикой конфиденциальности' (I have read and agree with the privacy policy). At the bottom is a large blue button labeled 'Вход' (Login). Below the button are two links: 'Забыли пароль?' (Forgot password?) and 'Регистрация' (Registration).

3. Если учетной записи нет, то Вам необходимо зарегистрироваться. Для этого нажмите на кнопку «Регистрация», введите адрес электронной почты, установите пароль, запросите код подтверждения на адрес электронной почты и введите его. Согласитесь с протоколом регистрации и нажмите на кнопку «Подтвердить».

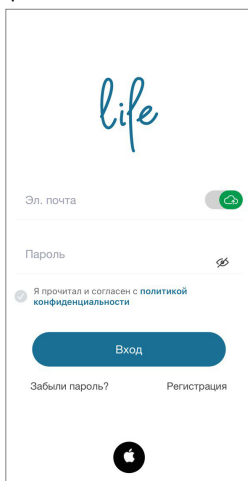


This is a duplicate of the screenshot described above, showing the login screen with the 'life' logo, email and password fields, a privacy policy checkbox, a 'Вход' button, and links for 'Забыли пароль?' and 'Регистрация'.

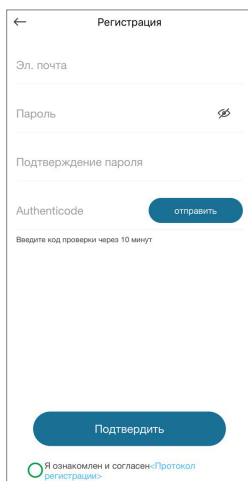


The screenshot shows the registration interface. At the top is a back arrow and the title 'Регистрация'. Below are three input fields: 'Эл. почта', 'Пароль', and 'Подтверждение пароля'. To the right of the password field is a crossed-out eye icon. Below the confirmation field is an 'Authenticode' label and a blue button labeled 'отправить' (send). Underneath is a note: 'Введите код проверки через 10 минут' (Enter the verification code in 10 minutes). At the bottom is a large blue button labeled 'Подтвердить' (Confirm). At the very bottom is a checkbox with the text 'Я ознакомлен и согласен с протоколом регистрации' (I am familiar and agree with the registration protocol).

- i** Вы также можете воспользоваться гостевым входом без регистрации, но тогда все данные о параметрах Вашего тела будут сохранены только в приложении. Некоторые функции приложения будут Вам недоступны, а в случае удаления приложения со своего смартфона данные Ваших измерений будут утеряны.


Чтобы воспользоваться гостевым входом нажмите на тумблер . Иконка сдвинется влево и станет серого цвета. Вы перейдете на экран гостевого входа. Здесь Вам будет необходимо согласиться с политикой конфиденциальности и нажать на кнопку «Пуск».

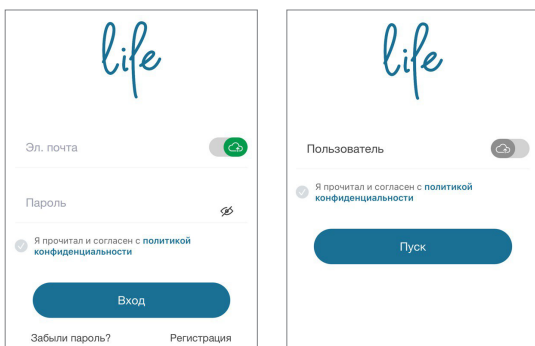

- 4.** После регистрации необходимо выбрать единицы измерения параметров Вашего тела и нажать на кнопку «Далее».

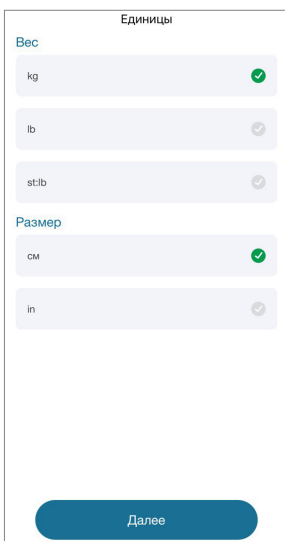

5. Далее необходимо заполнить карточку Вашего профиля и нажать на кнопку «Сохранить данные».

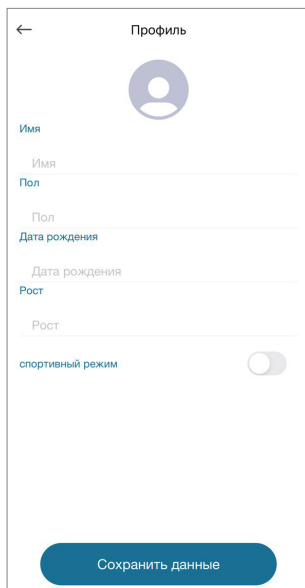

← Профиль

Имя

Имя

Пол

Пол

Дата рождения

Дата рождения


Рост

Рост


спортивный режим ☐

Сохранить данные



- i** Вы можете включить функцию «Спортивный режим». Для этого нажмите на тумблер ☐, иконка переместится вправо, тумблер станет синим ☒. Спортивный режим влияет на оценку AMR (Active Metabolic Rate – это количество калорий, которое сжигается за день).
6. Далее необходимо добавить устройство. В данном случае это умные весы.

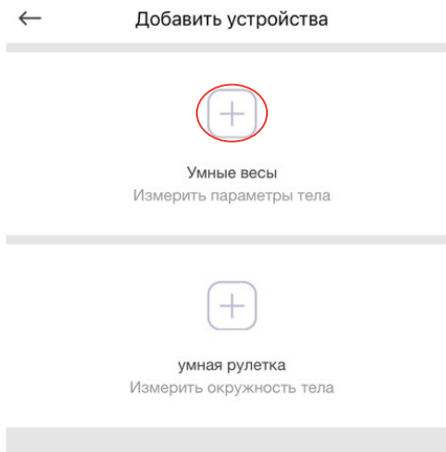


- i** Если Вы нажмете на иконку «Пропустить», приложение переместит Вас на главную страницу, но все равно предложит добавить устройство, чтобы начать работу.

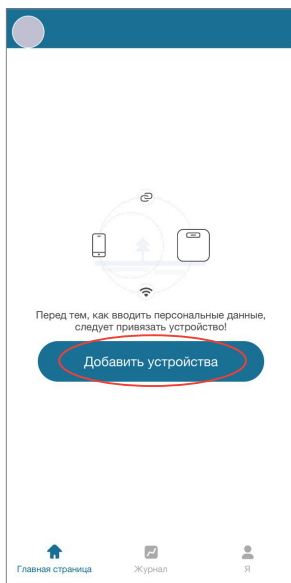

- 7.** Приложение проверит, включен ли у Вас Bluetooth, и после нажатия на кнопку «Далее» Вы перейдете непосредственно к добавлению устройства. Следуя инструкции на экране, встаньте на весы для включения и подождите, пока в приложении не появится устройство. Нажмите на кнопку «Привязать».

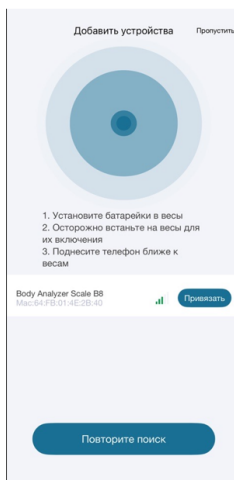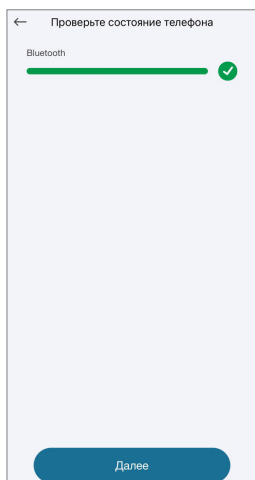

8. После успешного подключения можете сразу переходить к измерениям.

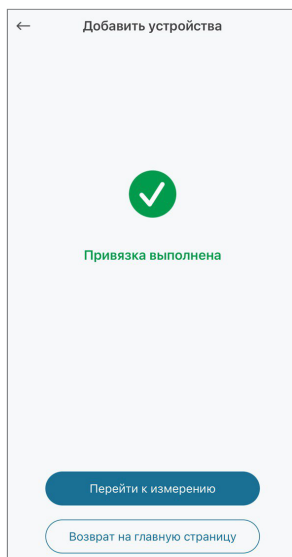

i Если не удастся добавить устройство:

- включите Bluetooth;
- сойдите с весов и встаньте на них еще раз;
- поднесите телефон ближе к весам;
- обратитесь за помощью в Отдел заботы о клиентах GARLYN